

## OHJE KANIEN MIKROSIRUTUKSEEN

Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry hyväksyy kaneilla käytettäväksi kaikki ISO 11784 standardin mukaiset maakoodittomat mikrosirut.

Mikrosirun asettaa eläinlääkäri tai mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö. Mikrosiru asetetaan ensisijaisesti lapaluiden väliin tai toissijaisesti kaulan tai niskan alueelle. Kanit voidaan mikrosiruttaa aikaisintaan viiden viikon iässä.

Mikrosirun asettajan eli tunnistusmerkitsijän tulee pitää luettelo kaikista asettamistaan siruista ja niiden asettamispäivämääristä. Luettelon pitomuodosta tai säilytysajasta ei ole annettu tarkempia säädöksiä. Tunnistusmerkitsijä huolehtii mikrosirujen hankinnasta.

### TOIMINTAOHJE:

1. Skannaa kani huolellisesti joka puolelta varmistaaksesi ettei eläintä ole vielä sirutettu.
2. Skannaa siru ennen paketin avaamista ja varmista, että numero vastaa paketin koodia.
3. Ota injektorin pakkauksesta, poista neulan suoja ja varmista.
4. Varmista, että neulan mäntä on itseesi päin.
5. Kohota nahkaa poimulle sormiesi väliin ja työnnä neula ihon alle.
6. Kun neula on kokonaan ihon alla, työnnä mäntä pohjaan asti, kunnes kuulet "klik"-äänen.
7. Siirrä sormiasi ja purista nahkaa neulan ympärillä samalla kun vedät neulan ulos.
8. Laita neulansuojus takaisin neulan päälle, hävitä käytetty injektorin turvallisesti.
9. Skannaa kani varmistaaksesi, että mikrosiru on paikallaan.

### SIRUTTAJAN VASTUUT:

- Hankkia kanille sopivat mikrosirut ja mikrosirunlukija.
- Tehdä sirutus huolellisesti ja hänelle ohjeistetulla tavalla hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisesti.
- Pitää luettelo kaikista asettamistaan siruista ja niiden asettamispäivämääristä.
- Täyttää sirutustiedot asianmukaisesti kanin sukutauluun.

### KANIN KASVATTAJAN/OMISTAJAN VASTUUT:

- Tuoda sirutustapahtumaan sirutettavalle kanille kuuluva sukutaulu.
- Lisätä kanin sirutieto johonkin valtakunnalliseen sirurekisteriin.